



CEDERROTH

Ögondusch i fickmodell

En personlig ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster.

Flaskan innehåller en steril, buffrad saltlösning. Flaskan är lättöppnad och aktiveras i ett steg genom att vrida om dammskyddet. Den integrerade ögonkoppen hjälper till att hålla ögat öppet under sköljningen och ger ett rikligt flöde utan onödigt spill. Cederroth Ögondusch är avsedd att användas vid ögonolyckor på arbetsplatser för att skölja bort främmande partiklar och skadliga ämnen. Cederroths buffrade Ögondusch har också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror.

Cederroth Ögondusch är avsedd att användas så tidigt som möjligt efter att olyckan har inträffat innan sköljning kan fortsätta vid en fast installerad ögonduschstation eller tills medicinsk hjälp har erhållits. Ögonduschen kan också användas under transport till sjukhus. Om den skadliga substansen utgörs av syra eller alkali, skölj minst 5-15 min (använd flera flaskor eller fortsatt sköljningen vid en vatten-ledningskopplad Ögondusch-station) och uppsök alltid läkare.

Cederroth Ögondusch i fickmodell REF 7221

235 ml steril buffrad isoton koksaltlösning utan konserveringsmedel

